

Portia

INFORMACJE DLA LEKARZA

dopochwowy pessar krążkowy

Czym jest pessar krążkowy Portia?

Jest to bezlateksowy, niesterylny przyrząd medyczny w kształcie krążka, produkowany i pakowany w UK zgodnie z normami *Dobrej Praktyki Produkcyjnej*. Zewnętrzna średnica wynosi od 50mm do 110mm a pessar wykonany jest z giętkiego winylu (PVC) o grubości ściany wynoszącej 12,5mm.

Dlaczego pacjentki decydują się na zastosowanie pessarów?

Pessar krążkowy jest bardzo często używany w celu podtrzymania wypadających organów miedniczych, gdy objawia się to wypadaniem macicy, cystocele, rectocele lub połączeniem różnych typów wypadania. Pessar może być założony tymczasowo, np. gdy pacjentka oczekuje na operację w celu poprawy tego stanu, lub na stałe, np. gdy operacja nie jest wskazana lub gdy pacjentka nie życzy sobie operacji.

Dopasowywanie rozmiaru i zakładanie pessarów.

Pessar zakładany jest wewnątrz pochwy w takiej pozycji aby utrzymywał wypadające organy w miejscu. Procedura dopasowania rozmiaru oraz założenia pessara powinna być przeprowadzana przez lekarza specjalistę.

Jak długo stosowany jest pessar?

Po dobraniu odpowiedniego rozmiaru oraz założeniu pessara, producenci zalecają jego wymianę co trzy miesiące, jednak ostatecznie jest to decyzja, którą podejmuje lekarz. Po tym czasie pessar powinien zostać wyjęty a miejsce jego stosowania sprawdzone w poszukiwaniu zmian. Zaleca się użycie pessara w czasie 5 lat od daty produkcji. Zarówno data produkcji jak i data przydatności znajdują się na opakowaniu.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej **www.pessar.pl** oraz pod numerem telefonu **62 501 35 50**.

