

ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI

Wkładka wewnątrzmaciczna SILVECTA® STANDARD SILVECTA® SHORT

Twój lekarz właśnie przepisał Ci antykoncepcyjną wkładkę wewnątrzmaciczną SILVECTA® opracowaną przez 7 MED Industrie i rozprowadzaną w Polsce przez firmę MERINGER®.

Ta ulotka została przygotowana dla Twojej informacji i odpowie na niektóre z Twoich pytań.

Zanotuj datę założenia oraz daty konsultacji kontrolnych na odwrocie i przechowuj tę ulotkę w bezpiecznym miejscu.

Czym jest antykoncepcja wewnątrzmaciczna?

Antykoncepcja wewnątrzmaciczna działa poprzez założenie wkładki w macicy, której właściwości zapobiegają zjściu w ciążę. Skuteczność antykoncepcji wewnątrzmacicznej została potwierdzona na całym świecie.

Działanie antykoncepcyjne miedzianej wkładki wewnątrzmacicznej wynika zasadniczo z plemnikobójczego efektu jonów miedzi. Po utlenieniu jony miedzi rozpraszają się lokalnie na poziomie szyjki macicy oraz śluzówki macicy.

Jednakże, jak wszystkie metody antykoncepcyjne, antykoncepcja wewnątrzmaciczna nie zapewnia absolutnego zabezpieczenia i jeśli dojdzie do opóźnienia Twoich okresów, musisz skonsultować się ze swoim lekarzem.

Czym jest SILVECTA®?

Za pomocą wkładki wewnątrzmacicznej 7 MED Industrie przynosi korzyści lekarzom i pacjentkom dzięki swojej technologii środków medycznych oraz sterylnego jednorazowego sprzętu medycznego i chirurgicznego.

SILVECTA® to wkładka wewnątrzmaciczna wykonana z miedzi z oznaczeniem CE zgodnym z Europejską Dyrektywą 93/42/EEC.

Wewnątrzmaciczny środek antykoncepcyjny jest gotowy do użycia, w sterylnym opakowaniu, złożony z dwóch elastycznych ramion z polietylenu, wystających z pionowej osi, nie przepuszczający promieniowania dzięki siarczanowi baru i otoczony skrętką z drutu miedzianego o powierzchni 380 mm² i wyposażony w pojedynczą nitkę nylonową u podstawy wkładki.

Produkcja SILVECTA® spełnia najostrożniejsze normy pod względem sterylności i jakości.

SILVECTA® jest wskazana dla większości kobiet, które chcą stosować antykoncepcję wewnątrzmaciczną.

Skład SILVECTA®: miedź, srebro, polietylen, siarczek baru, poliamid 6.

Po badaniu lekarskim i zgodnie z wielkością Twojej macicy, lekarz wybierze model, STANDARD lub SHORT, zgodnie z Twoją anatomią.

W jaki sposób zakłada się wkładkę SILVECTA®?

Wkładkę SILVECTA® zakłada się w trakcie ostatnich dni okresu lub bezpośrednio po nim. Twój lekarz najpierw założy wziernik. Po dezynfekcji szyjki i pochwy oraz zmierzeniu głębokości macicy, lekarz użyje cienkiej rurki w celu umieszczenia wkładki SILVECTA®, poprzez szyjkę, w macicy.

Po założeniu, które zabierze zaledwie kilka sekund, rurka aplikatora zostanie wyciągnięta, a lekarz przytnie nitki do odpowiedniej długości.

Wyjęcie wziernika kończy zabieg.

Jakie są przeciwwskazania?

■ Wkładki SILVECTA® nie wolno stosować w następujących sytuacjach:

- anomalie jamy macicy, niewłaściwa budowa macicy, zapalenie jajowodu lub zaburzenia macicy, zapalenie śluzówki macicy, podejrzewany nowotwór, guzy, włókniaki, polipy, niedawno przebyte zapalenia miednicy, krwawienie z genitaliów o nieznanym etiologii
- u pacjentek z chorobą Wilsona lub znaną alergią na miedź
- ciąża

■ Stosowanie SILVECTA® nie jest zalecane w następujących sytuacjach:

- bliznowacenie macicy drugorzędne dla innych przyczyn niż cesarskie cięcie
- bolesne miesiączkowanie, krwotok miesięczkowy

Co się stanie podczas mojej pierwszej menstruacji po założeniu SILVECTA®?

Wkładka SILVECTA® zapewnia skuteczną antykoncepcję bezpośrednio po założeniu.

Możesz doświadczyć pewnych skurczy brzucha tuż po zabiegu założenia, ale powinny szybko osłabnąć i zniknąć.

W rzadkich przypadkach, może wystąpić niewielkie krwawienie, ale nie stanowi powodu do niepokoju i ustąpi spontanicznie po kilku dniach. Nie wahaj się skontaktować ze swoim lekarzem, jeśli będziesz zaniepokojona lub jeśli krwawienie nie ustąpi po kolejnym okresie.

Należy zauważyć, że niektóre kobiety z założoną wkładką wewnątrzmaciczną mogą mieć obfitsze, dłuższe lub bardziej bolesne okresy.

Jeśli chcesz, możesz stosować tampony podczas okresów, ale musisz sprawdzać po okresach, czy nitki są na swoim miejscu na końcu pochwy.

Czy należy podjąć jakieś szczególne środki ostrożności?

■ Po każdym okresie musisz sprawdzić, czy nadal wyczuwasz nitki SILVECTA® wkładając dwa palce do pochwy w pozycji kucznej. Jeśli nie wyczuwasz nitek, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

■ Jeśli Twój lekarz przepisze antykoagulanty lub środki przeciwzapalne, powinnaś poinformować swojego lekarza, że posiadasz założoną wkładkę wewnątrzmaciczną. Niesterydowe leki przeciwzapalne należy używać wyłącznie w krótkich seriach. Krótkie serie standardowych dawek niesterydowych leków

przeciwzapalnych nie wpłyną na skuteczność antykoncepcyjną wkładki.

■ Jeśli zauważysz początek nienormalnych upławów, musisz się skonsultować ze swoim lekarzem w celu ewentualnej diagnozy oraz leczenia infekcji szczególnie, jeśli odczuwasz ból i masz temperaturę.

■ Jak w przypadku każdej wkładki wewnątrzmacicznej, powinnaś skonsultować się ze swoim lekarzem, jeśli Twoje okresy będą się opóźniać, aby wyeliminować rzadką możliwość ciąży.

■ W przypadku kobiet, które wcześniej nie rodziły, należy zbilansować oczekiwane korzyści z ewentualnym ryzykiem. U młodych kobiet główne ryzyko to infekcje przenoszone drogą płciową, szczególnie w przypadku wielu partnerów.

Czy SILVECTA® może zakłócać stosunki płciowe?

■ Znana skuteczność wkładki wewnątrzmacicznej SILVECTA® zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed niechcianą ciążą.

■ Antykoncepcja wewnątrzmaciczna nie chroni przed ryzykiem chorób przenoszonych drogą płciową. Prezerwatywa jest dlatego zalecana poza stałym związkiem partnerskim.

Kiedy muszę skonsultować się z moim lekarzem i wymienić wkładkę wewnątrzmaciczną?

■ Pierwsza konsultacja jest konsultacją kontrolną, która ma miejsce po pierwszym okresie po założeniu wkładki.

■ Oprócz regularnych kontroli, 5 symptomów powinno Cię skłonić do konsultacji z lekarzem:

- uporczywy ból brzucha
- nienormalne upławy
- początek okresu opóźniony o ponad 7 dni
- jeśli nie wyczuwasz nitek wkładki po zbadaniu palcami po okresie
- niewyjaśniona podwyższona temperatura

■ SILVECTA® należy regularnie wymieniać, co najmniej po 5 latach.

Nową wkładkę wewnątrzmaciczną SILVECTA® można założyć od razu.

Gdybyś chciała zająć w ciążę, możesz w każdej chwili poprosić swojego lekarza o wyjęcie wkładki wewnątrzmacicznej.

Klasyfikacja oraz opakowanie

SILVECTA® jest środkiem medycznym klasy III, który jest zgodny z dyrektywą europejską 93/42/EEC na temat środków medycznych.

Etykieta: CE od 2005

Każde opakowanie zawiera jedną sterylną, jednorazową wkładkę, której data przydatności jest podana na opakowaniu.

IUD należy przechowywać w suchym miejscu, poniżej 40°C.

TABELKA KONTROLNA DO WYPEŁNIENIA I ZACHOWANIA

Imię:

Nazwisko:

Data założenia:

Rodzaj wkładki:

SILVECTA® STANDARD

SILVECTA® SHORT

Seria:

Pierwsza konsultacja kontrolna po pierwszym okresie po założeniu:

.....

Regularne konsultacje kontrolne:

co roku

co 6 miesięcy

inaczej

Powinam skonsultować się z moim lekarzem w przypadku:

bólu brzucha

nienormalnego
krwawienia/nieprzyjemnych
upławów

okresów opóźnionych o ponad 7 dni

niewyczuwalnych nitok wkładki

niewyjaśnionej temperatury

Mogę nosić moją wkładkę wewnątrzmaciczną
SILVECTA® z pełnym bezpieczeństwem przez
maksymalny okres 5 lat.

Planowana data wymiany:

.....

meringer®

 **0459 od 2005**
STERILE | R

MERINGER Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 95/8A
62-800 Kalisz, Polska
Tel. +48 62 764 00 29
www.meringer.pl

7 MED Industrie
Le BioParc
03270 Hauterive
Francja



SILVECTA®

miedziana wkładka wewnątrzmaciczna | miedź-srebro



ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI

meringer®